

## TWIN

TRYPAN BLUE 0,18% + BLULIFE 0,03%

6 SIRINGHE PRERIEMPIE DA 0,7 ML

## COLORAZIONE DEI TESSUTI

	TWIN
<b>Ingredienti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ trypan blue</li> <li>▶ blulife (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S)</li> <li>▶ agente addensante</li> <li>▶ cloruro di sodio</li> <li>▶ fosfato di sodio monobasico</li> <li>▶ fosfato di sodio bibasico</li> <li>▶ acqua per iniettabili</li> </ul>
<b>Concentrazione coloranti</b>	trypan blu 0,162 - 0,198 %p/V blulife 0,027 - 0,033 %p/V
<b>Attività idrogenionica (pH)</b>	7,00 - 7,40 unità pH
<b>Osmolalità</b>	270 - 330 mOsm/kg
<b>Densità</b>	1,015 - 1,018 g/ml
<b>Endotossine batteriche</b>	< 0,5 EU/ml
<b>Test di Citotossicità</b>	Non citotossico in accordo a UNI EN ISO 10993-5, test per contatto diretto eseguito su due linee cellulari: - cellule di epitelio pigmentato retinico (ARPE-19) - fibroblasti murini (BALB 3T3 clone A31)
<b>Stato fisico</b>	liquido sterile
<b>Volume</b>	≥ 0,7 ml
<b>Confezionamento</b>	siringa
<b>Sterilizzazione</b>	sterilizzazione a vapore in accordo a UNI EN 556-1 e UNI EN ISO 17665-1
<b>Temperatura di conservazione</b>	+15°C / +32°C
<b>Scadenza</b>	36 mesi
<b>Indicazioni d'uso</b>	colorazione reversibile delle membrane retiniche e della membrana limitante interna (ILM) durante la chirurgia oftalmica
<b>Categoria</b>	dispositivo medico
<b>Codice GMDN</b>	P 45180
<b>Codice CND</b>	Q 02030201
<b>Registrazione repertorio SSN</b>	1331847/R
<b>Classe del dispositivo</b>	Ila
<b>Marchio CE</b>	CE 0546

TWIN è trypan blue allo 0,18% + blulife (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) allo 0,03% in soluzione fisiologica, confezionato in siringhe da 0,7 ml, per la colorazione reversibile delle membrane retiniche e della membrana limitante interna (ILM) da asportare nel corso della chirurgia vitreo retinica. Il prodotto garantisce una colorazione efficace e rapida dei tessuti, senza rischi per il paziente. Contiene un agente addensante che migliora il contatto dei coloranti con i tessuti, permettendo una visualizzazione perfetta delle membrane retiniche e della membrana limitante interna. Inoltre, semplifica la chirurgia, rendendo superfluo lo scambio fluido/aria che si effettua prima dell'iniezione del colorante per non diluirlo.

**Codice:** RMB 004-00

**Confezionamento:**

- ▶ 6 siringhe preriempite di TWIN da 0,7 ml
- ▶ 6 pistoni
- ▶ 1 foglietto illustrativo
- ▶ 12 etichette per la tracciabilità del prodotto

**Codice a barre GS1-128**

ALCHIMIA

Viale Austria, 14  
35020 Ponte S. Nicolò (PD)  
Italia

P.IVA IT 00063370282

Tel. +39 049 8962074 / 64  
Fax +39 049 8962071

www.alchimiasrl.com  
info@alchimiasrl.com